



stupnica belosti **biela perla**

Dôležité informácie

- Pred začatím bielenia musia byť zuby a ďasná zdravé. Výrobok je určený na prirodzené zuby, na plomby a korunky nemá negatívny vplyv.
- Počas bieliacej kúry obmedzte na minimum jedenie a pitie zafarbujuúcich nápojov, napr. červené víno, čierny čaj, káva, čierne ovocie a pod..
- Počas bielenia sa neodporúča fajčiť. Nikotín je jedným z faktorov spôsobujúcich mikrozafarbenia na zuboch.
- Po bielení zabezpečte dôkladné uzavretie nádoby s bieliacim gélom.
- Počas aplikácie bieliaceho gélu je potrebné obmedziť na minimum kontakt gélu s ďasnami a perami.

Výrobca

DIMENZIA, spol. s r.o.
Štúrova 33
060 01 Kežmarok
Vyrobené na Slovensku.



www.biela-perla.sk

[biela.perla](#)

[Biela Perla SK](#)

Upozornenia

- Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je určený osobám mladším ako 14 rokov, tehotným a dojčiacim ženám.
- Výrobok nepoužívajte pri akýchkoľvek problémoch s ďasnami (krvácanie, zápal, parodontitída), alebo pri alergií na akúkoľvek látku vo výrobku.
- Počas bielenia zabráňte kontaktu gélu s ďasnami.
- Ak sa počas používania vyskytne citlivosť ďasien, zubov alebo jazyka, vypláchnite si dôkladne ústa čistou vodou.
- Ak problém neustúpi, urobte si prestávku v používaní, alebo prestaňte výrobok používať.
- Vyhnite sa kontaktu bieliaceho gélu s očami. V prípade kontaktu si vypláchnite oči vodou, alebo kontaktujte svojho lekára.



Skladovanie

Skladujte pri izbovej teplote, bez priameho slnečného žiarenia, mimo dosahu detí.

:bieliace pero biela perla®



EXPRESNÉ BIELENIE ZUBOV

:bieliace pero biela perla® je určené pre rýchle bielenie zubov s pomocou praktického pera v pohodlí domova. Odstraňuje organické zafarbenia zubov oxidačným procesom a prinavracia zubom prirodzenú belosť a lesk.

- Bieliaca kúra bola vyvinutá pre rýchle bielenie zubov. Bielenie odstraňuje organické zafarbenia zubov oxidačným procesom a prinavracia zubom prirodzenú belosť a lesk.
- Pero s bieliacim gélom možno používať 1-3 krát denne.
- Pre dosiahnutie rýchlejších výsledkov sa odporúča použitie 3 krát denne počas prvých 4 dní, potom možno čas použitia skrátiť na 2 krát denne.
- Bieliace pero možno používať aj 1 krát denne pri nedostatku času.
- Bieliaca kúra trvá od 4-14 dní. 14 dní je maximálna odporúčaná dĺžka bielenia.
- Každý používateľ bieliaceho pera si sám určí spôsob použitia, ktorý najviac vyhovuje jeho dennému zvykom a času, za ktorý potrebuje bielenie dosiahnuť.
- Výsledky bielenia závisia od stupňa zafarbenia zubnej skloviny, zdravotného stavu zubnej skloviny a od veku používateľa.
- Následná bieliaca kúra sa odporúča zopakovať po 6 mesiacoch.
- Na udržanie čo najdlhšieho efektu bielenia odporúčame používať zubné pasty Biela Perla® určené na každodenné použitie.

Návod na použitie

1 Dôkladné umytie zubov

Pred bielením je potrebné dôkladne si umyť zuby zubnou pastou. Intenzívne bielenie, ktorá pripraví zuby na bielenie a je súčasťou balenia.

2 Nasadenie fixátora

Nasadte si fixátor do úst podľa obrázku. Fixátor zabezpečí dôkladné naniesenie a pôsobenie bieliaceho gélu.

3 Bielenie

Otvorte si bieliace pero. Nanášajte bieliaci gél na všetky zuby, ktoré potrebujete vybieliť. Aby boli zuby správne natreté, je potrebné aplikátor ponoriť do gélu viackrát. Vyhnite sa kontaktu gélu s ďasnami. Gél nechajte pôsobiť na zuboch 3 minúty. Fixátor vyberte z úst a prebytočný gél vyplujte.

4 Po bielení

Po bielení nevyplachujte ústa vodou, nejedzte a nepite 30 minút. Po bielení zabezpečte dôkladné uzavretie nádoby s bieliacim gélom.

