

Pre dlhšie udržanie výsledkov bielenia so systémom na bielenie zubov odporúčame používať zubné pasty **biela perla®**:

stupnica belosti **biela perla®**

Pred bielením



Výrobca: DIMENZIA, spol. s r.o., Štúrova č. 33,
060 01 Kežmarok. Vyrobene na Slovensku.

Denné rituály počas bielenia:



Počas bielenia obmedzte na minimum konzumovanie tmavých nápojov ako **káva, čaj, červené víno**.



Zdržte sa **fajčenia**. Nikotín je jednou z príčin mikronezistení na zuboch.



Pred bielením nepoužívajte medzizubné kefky alebo zubnú niť. Drobné poranenia na dasnách by mohli spôsobiť citlosť dasien.



Pred bielením si umyte zuby **zubnou pastou**, bieliac gél lepšie účinkuje na umyte zuby.



Po bielení si ústa vypláchnite vodou, aplikátory opláchnite a uskladnite v krabičke.



Rýchlejšie výsledky dosiahnete bielením 2x denne.



Upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je určený osobám mladším ako 14 rokov, tehotným, dojčiacim ženám, ľudom s akými-koľvek problémami s dasnami (krvácanie, zápal, paradontoza), alebo pri alergii na akúkoľvek látku výrobku. Ak sa počas používania vyskytne citlosť dasien, zubov alebo jazyka, opláchnite si ústa čistou vodou. Ak problém neustúpi, urobte si prestávku v používaní, alebo prestaňte výrobok používať.

:systém na bielenie zubov
biela perla®

TRADÍCIA
OD ROKU 1996



VIDITEĽNÝ EFEKT BIELENIA
UŽ PO 5 DŇOCH

NÁVOD NA POUŽITIE

Biela Perla® Systém na bielenie zubov

je určený na domáce bielenie zubov, spôsobom, aký používajú stomatológovia. Odstraňuje zafarbenia na zuboch počas 14 dní bielenia, s viditeľnými efektami bielenia už po 5 dňoch.

biela perla® odstraňuje každodenné zafarbenia na zuboch spôsobené potravinami, nápojmi alebo fajčením. Výsledkom je prirodený a jasnejší biely úsmev, ktorý vydrží niekoľko mesiacov.

formovanie zubných aplikátorov na bielenie



Spôsob použitia

1. Formovanie zubných aplikátorov na bielenie Balenie obsahuje 2 aplikátory na horné a dolné zuby (ilustračný návod vľavo dole)

1. Necháte zovrieť vodu a chvíľu počkáte, aby vychladla (približne na 80° C). Voda nesmie byť vriaca, aby nepopálila vaše ústa.
2. Uchopite držiačik aplikátoru, ponorite aplikátor do horúcej vody na cca. 5 sekúnd a počkáte pokiaľ nezmäkne. Zubný aplikátor po pár sekundách vytiahnite z vody a chvíľu počkajte, aby nepopálil vaše ústa.
Upozornenie: Dlhším prehriatím sa aplikátor môže znehodnotiť.
3. Zmäknutý aplikátor si nasadte na zuby, zahryznite do neho a zo všetkých strán ho prstami a jazykom poprítláčajte. Po vyformovaní si aplikátor vyberte z úst a nechajte ho stvrnduť.
4. V prípade nespokojnosti s tvarom aplikátora môžete celý postup ešte raz zopakovať.
5. Po stvrdení si aplikátor ešte raz vložte do úst a presvedčte sa, či vám pohodlne sedí a netlačí na dasná. Ak vám aplikátor tlačí na dasná, alebo príliš zasahuje do zadnej časti úst, môžete natyčtený materiál z aplikátora odstrániť.
Tip: Nasadte si aplikátor a pred zrkadlom si na neho perom obkreslite čiaru ktorá oddeluje zuby od dasní. Potom podľa tejto čiary aplikátor zostrihnrite. Docielite tak presný otlak na vašich zubov, ktorý nezasahuje na dasná a tak dasná počas bielenia neprídu do kontaktu s bieliacim gélem.
6. Ak ste s tvarom aplikátora spokojní, držiačik odstrániť.

2. Dávkovanie bieliaceho gélu Plati pre horné a dolné zuby

1. Do aplikátora si naneste bieleaci gél z tuby. Bieleaci gél rovnomerne rozotrite po prednej strane aplikátora. Naplnený aplikátor zatiaľ položte nabok.
2. Otvorte si nádobku s aktivátorm a štetcom si v 1 fáze dôkladne natrite aktivátor na všetky zuby. Na pokrytie všetkých zubov je potrebné niekoľkokrát namočiť štetec do nádoby.
3. Po natretí zubov aktivátorom si rýchlo nasadte na zuby pripravený a naplnený aplikátor s bieleacim gélem.
4. Úspešnosť bielenia spočíva v dôkladnom natretí aktivátora štetcom + rýchle nasadenie bieleacieho gélu v aplikátore.

3. Pôsobenie bieleacieho gélu Plati pre horné a dolné zuby

1. Aplikátor s gédom nechajte pôsobiť 10-20 minút, 1 -2 x denne.
2. V prípade, že gél preteče na dasná, odstráňte ho obrúskom, alebo vyplijte.
3. Po ukončení doby bielenia si aplikátor vyberte z úst, ústa si vypláchnite čistou vodou a prebytočný gél odstráňte zubnou kefkou. Aplikátor dôkladne umyte a nechajte vyschnúť.
4. Nejdzete a nepite 30 minút po vykonaní bieleacej kúry, s výnimkou pítia čistej vody.
5. Výrobok používajte maximálne 14 dní. Po skončení bielenia môžete ďalšie bielenie opakovať po 6 mesiacoch.



1. fáza spočíva v dôkladnom natretí zubov štetcom - aktivátorom



V 2. fáze sa do vyformovaných aplikátorov nanesie bieleaci gél a nechá sa pôsobiť 10-20 minút.