

stupnica belosti **biela perla**

Pred bielením
Po bielení



Dôležité informácie

- Na začiatku a na konci bieliackej kúry si zaznačte farbu zubov na stupnici belosti.
- Počas bielenia obmedzte konzumáciu tmavých jedál a nápojov na minimum, alebo sa snažte zabrániť ich kontaktu so zubami.
- Obmedzte alebo vynechajte fajčenie počas doby bielenia. Nikotín je jednou z príčin mikroznečistení na zuboch.
- Pred bielením **nepoužívajte** medzizubné kefy ani zubnú niť. Drobné poranenia ďasien by mohli spôsobiť ich citlivosť.
- Po bielení aplikátory uskladňujte v priloženej krabičke.

Upozornenie

Uchovávať mimo dosahu detí.
Výrobok nie je určený osobám mladším ako 14 rokov, tehotným a dojčiacim ženám, ľuďom s akýkoľvek problémami s ďasnami (krvácanie, zápaly, paradontóza) alebo pri alergii na akúkoľvek zložku výrobku. Pokiaľ sa počas používania výrobku vyskytnú citlivosť ďasien, zubov alebo jazyka, opätne si ústa čistou vodou. Pokiaľ problémy neustúpia, spravte si v používaní výrobku prestávku, používajte ho každý druhý deň, alebo ho prestaňte používať úplne.

Výrobca

DIMENZIA, spol. s r.o.

Štúrova 33

060 01 Kežmarok

Vyrobené na Slovensku.



www.bielaperla.sk



@biela.perla



Biela Perla SK

Triple action

VIDITEČNÝ
5
DŇÍ
EFEKT

OXI+

biela perla®

:systém na bielenie zubov



oxidačné
bielenie zubov



bezpečné
pre zubnú sklovinu



1 Pripraví zubnú sklovinu na bielenie.



2 Aktivuje účinok bieliacého gélu.



3 Aktívne bieli zubnú sklovinu.

biela perla®

Triple action OXI+

:systém na bielenie zubov

biela perla® Triple action OXI+ je moderný prípravok určený na bielenie zubov s použitím oxidačnej receptúry OXI+. Obsahuje tri účinné gély :iniciačný, :aktivačný a :bieliaci gél. :iniciačný gél obsahuje aktívnu bieliacu látku PAP, ktorá účinne odstraňuje škvrny nachádzajúce sa na povrchu zubnej skloviny. :aktivačný a :bieliaci gél odstraňujú zafarbenia zo zubov vo vnútri zubnej skloviny spôsobené dlhodobým a pravidelným konzumovaním zafarbujuúcich jedál a nápojov, alebo fajčením.

Bieliaci systém Triple action OXI+ poskytuje používateľovi tieto výhody:

- **krátky čas aplikácie na zuby – 10-20 minút***
- **krátke trvanie celej kúry – 5 dní****
- **vysoká účinnosť – viditeľný bieliaci efekt*****
- **bezpečné bielenie pre sklovinu a ďasná**
- **jedinečné tvarovateľné aplikátory umožňujúce individuálne prispôbienie sa zubom**

* Postaćujúci čas aplikácie 10 minút je pre slabšie zafarbené zuby. Pre silnejšie zafarbené zuby odporúčame predĺžiť dobu bielenia na 20 minút.

** Balenie vystačí maximálne na 10 dní kúry pri použití 2x denne. Dĺžka ošetrenia závisí od individuálneho posúdenia a očakávanej úrovne bielenia.

*** Pre väčšinu používateľov je bieliaci efekt viditeľný už po 5 dňoch.

Návod na použitie

1. Formovanie zubných aplikátorov

Balenie obsahuje 2 aplikátory na horné a dolné zuby.

1. Nechajte zovrieť vodu a počkajte chvíľu, kým vychladne (približne na 80 °C). Voda nesmie byť vriaca, aby nepopálila vaše ústa.
2. Uchopte držiak aplikátora, ponorte ho do horúcej vody na 5-10 sekúnd a počkajte, kým aplikátor nezmäkne. Po niekoľkých sekundách vyberte zubný aplikátor z vody a chvíľu počkajte, aby nepopálil vaše ústa.

Upozornenie: Príliš dlhé držanie aplikátora v horúcej vode ho môže poškodiť.

3. Zmäknutý aplikátor si nasadte na horné zuby, zahryznite do neho a popritlačajte ho prstami a jazykom zo všetkých strán. Po vyformovaní si aplikátor vyberte z úst a nechajte stvrdnúť.
4. Vytvarovaný a vytvrdnutý aplikátor si znova vložte do úst a skontrolujte, či nie je príliš tesný alebo príliš dlhý. Nepotrebné alebo otláčajúce časti a držiak je možné odstrániť.

TIP: Nasadte si aplikátor a pred zrkadlom si na neho perom obkreslite čiaru, ktorá oddeľuje zuby od ďasien. Potom aplikátor zostrihnite podľa tejto čiary. Docielite tak presný odtlačok vašich zubov, ktorý sa nebude dotýkať ďasien.

5. Opakujte kroky 1-4 pre vytvarovanie aplikátora na dolné zuby.



2. Umývanie zubov

:iniciačný gél (tuba č. 1 s géloom)

1. Vytlačte si malé množstvo :iniciačného gélu na zubnú kefku. Odporúča sa použitie mäkkej zubnej kefky.
2. Dôkladne si vyčistíte zuby zo všetkých strán. Umývanie zubov by malo trvať 2 minúty.
3. Vypláchnite si ústa vodou.

3. Bielenie zubov

:aktivačný gél (nádobka č. 2 s géloom)

a :bieliaci gél (tuba č. 3 s géloom)

1. Do čistých a suchých aplikátorov si vytlačte cca 1 ml (1 cm) :bieliaceho gélu z tuby. Gél rovnomerne rozotrite na vnútornú prednú stranu aplikátorov (použite napr. čajovú lyžičku).

Naplnené aplikátory zatiaľ odložte nabok!

2. Otvorte si nádobku s :aktivačným géloom. Všetky zuby si dôkladne natrite štetcom. Na pokrytie všetkých zubov je potrebné si niekoľkokrát namočiť štetec do nádoby.

Po natretí sa vyhňte kontaktu zubov s perami.

3. Pripravené naplnené aplikátory s :bieliacim géloom si rýchlo nasadte na zuby.

4. Pôsobenie bieliaceho gélu

1. Aplikátory nechajte pôsobiť na zuboch po dobu 10-20 minút 1-2x denne.
2. Ak je to potrebné, utrite si prebytočný gél vytekajúci z aplikátora obrúskom alebo ho vyplňte. Pozn. Na jednu dávku stačí iba malé množstvo gélu. Nadmerné množstvo gélu z aplikátorov vytečie.
3. Po ukončení doby bielenia si aplikátory vyberte z úst. Na odstránenie prebytočného gélu zo zubov si umyte zuby čistou zubnou kefkou a vypláchnite ústa vodou.
4. Nejedzte a nepite po dobu 30 minút po vykonaní bieliacej kúry, s výnimkou pitia čistej vody.
5. Bieliaci systém Triple action OXI+ používajte maximálne 10 dní. Po skončení bielenia môžete ďalšie bielenie zopakovať po 6 mesiacoch.